

# Produktdatenblatt und Gebrauchsanleitung

TF-9006


## FFP2 NR - Maske

- Produktart: Filtrierende Halbmaske  
PSA Klasse III gem. Verordnung (EU) 2016/425 und EN 149:2001 + A1:2009  
EU – Konformitätserklärung abrufbar unter: <http://www.e-tengfei.com/Article/tfkjgfyxgs.html>
- Produkt: FFP2 Atemschutzmaske NR (für den Einmalgebrauch)
- Produktbezeichnung: TF-9006
- Verwendungszweck: Eigenschutz / Arbeitsschutz
- Schutzwirkung: Schutz des Trägers vor festen und flüssigen Aerosolen


### Artikelbeschreibung

- Einweg-Maske mit hohem Tragekomfort: Ergonomisches Design und geruchsfrei
- Effiziente Filtration: Guter Schutz gegen Staub, Nebel, Bakterien, Tröpfchen


### Gebrauchsanleitung:

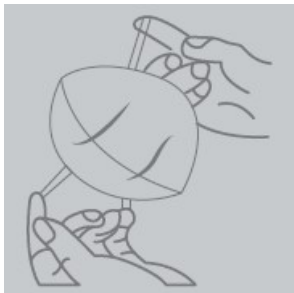

Halten sie die Maske mit beiden Händen an den jeweiligen Gummibändern.

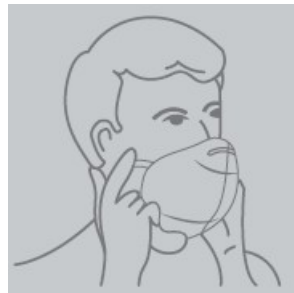

Drücken Sie die Maske auf ihr Gesicht, so dass Nase und Mund bedeckt sind. Der Metallclip muss dabei auf der oberen Außenseite zu finden sein.

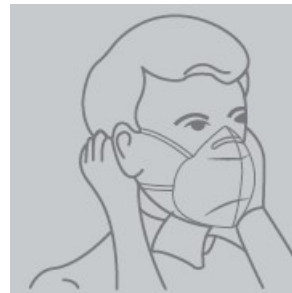

Ziehen sie die Gummibänder über beide Ohren.



Drücken sie den Metallclip auf ihren Nasenrücken, so dass die Maske nicht verrutschen kann.

### Sicherheitshinweise:

- Falls es nicht möglich sein sollte, die Maske dem Gesichtsprofil anzupassen, betreten Sie keine Räume mit potentielltem Risiko.
- Die Nichtbeachtung der in diesem Hinweis enthaltenen Vorschriften kann zu falschem Gebrauch der PSA führen und Krankheiten und Tod verursachen.
- Ein angemessen gewähltes Atemgerät ist grundlegend für den Schutz Ihrer Gesundheit. Vor dem Gebrauch der PSA konsultieren Sie eine in Industriehygiene Person oder Experten in Berufsschutz, um die Gebrauchseignung zu bestimmen.

- Dieses Produkt liefert keinen Sauerstoff. Nur in angemessen belüfteten Räumen mit zum Überleben ausreichendem Sauerstoffgehalt benutzen. Die Grenzwerte bzgl. der Sauerstoffpräsenz in einem bestimmten Umfeld für den Gebrauch dieser Masken können von Land zu Land unterschiedlich sein. Bitte beachten Sie die für die Einsatzland geltenden Eckwerte. Eleco s.r.l. rät in jedem Fall von dem Gebrauch in Räumen ab, deren Sauerstoffkonzentration unter 19,5% liegt
- Nicht benutzen wenn die Schadstoffkonzentrationen gesundheits- oder lebensgefährlich sind. / Nicht in explosionsgefährdeter Umgebung verwenden.
- Den Arbeitsbereich sofort verlassen, wenn (a) das Atmen schwer fällt oder (b) wenn Sie Angstgefühle oder Schwindel verspüren.
- Barthaare und Atemwegserkrankungen können die Wirksamkeit dieser filternden Halbmasken verringern.
- Die filtrierende Halbmaske auf keinen Fall verändern oder manipulieren.
- Einweggebrauch. Wartungsfrei.
- Die Halbmaske nach jedem einzelnen Gebrauch entsorgen.
- Die noch nicht benutzten Halbmasken in ihrer unversehrten Verpackung vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren.

#### **Lagerungsbedingungen:**

- Achten sie auf eine trockene Lagerumgebung bei Zimmertemperatur.
- Bringen sie die Maske nicht mit Wasser in Berührung.
- Lagerzeit beträgt maximal 3 Jahre (Herstellungsdatum ist auf der jeweiligen Maske ausgewiesen).

*Hergestellt in China durch  
Tengfei Technology Co., Ltd  
No. 111 Tongqiu Road  
Zhangpu Town, Kunshan Ciy, Jiangsu Province*

*Importiert durch:  
GTP Schäfer Trading GmbH Triftweg 20, 50226  
Frechen-Königsdorf*